



La incontinencia urinaria es un padecimiento que puede aparecer con la edad. Impacta emocionalmente a las personas. Afectando de manera importante su autoestima y calidad de vida


Nuevo

# harex

Dispositivo médico novedoso que detiene la salida involuntaria de orina, recuperando la seguridad y autoestima de los pacientes

Dispositivo discreto, cómodo, novedoso, ligero, durable y seguro para el control de la incontinencia urinaria masculina

Producto de España  
para México

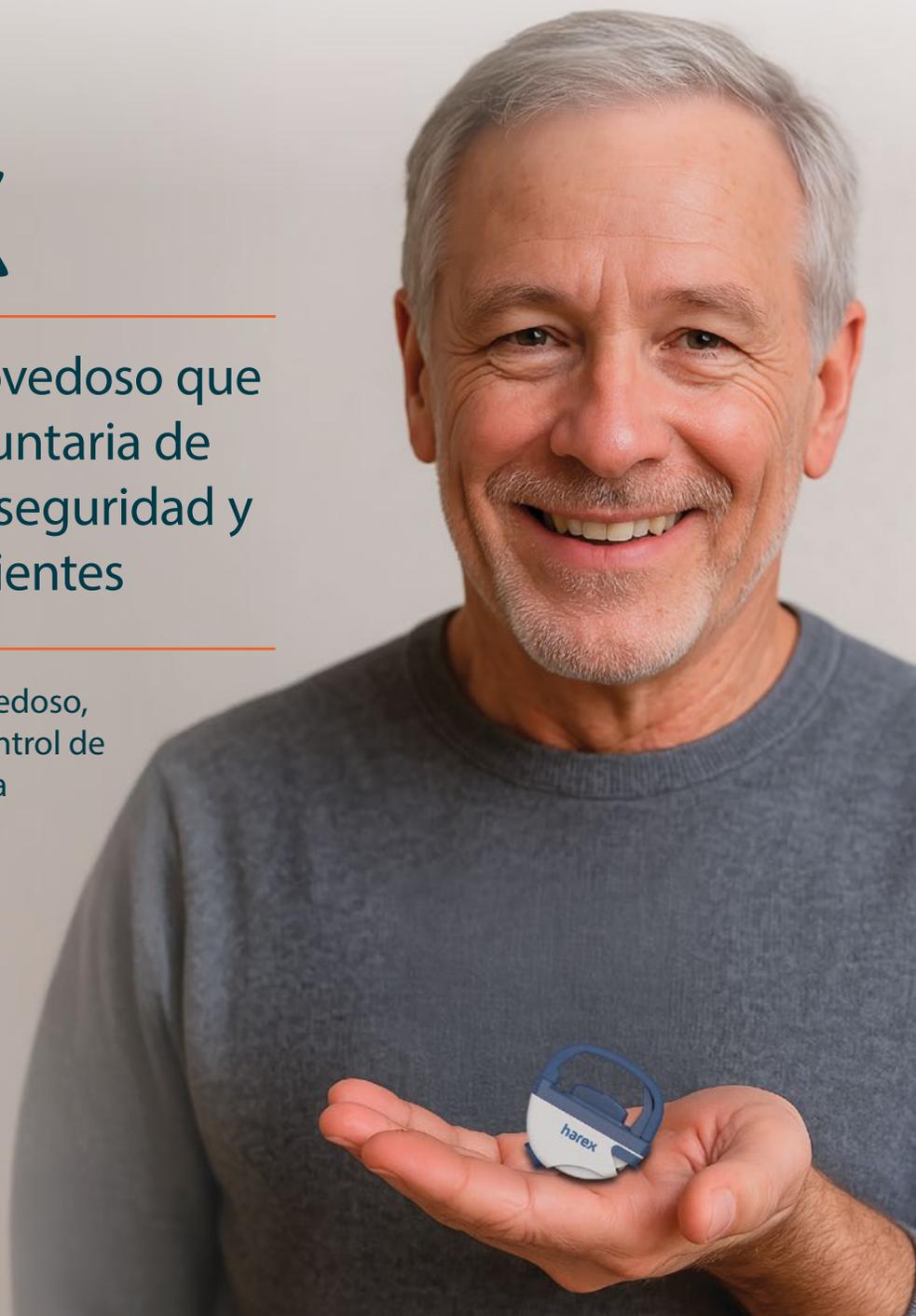

# Nuevo HAREX, se coloca detrás de la cabeza del pene.

## Características de HAREX

**HAREX** es un dispositivo médico para detener el flujo de la orina mediante una suave presión en la uretra con el fin de prevenir y controlar los escapes involuntarios de orina. Se coloca por detrás de la cabeza del pene.

### Cojín para presionar

Presiona cómodamente la uretra y frenar la salida de orina.

### Correa de presión

Ejerce presión cómoda y efectiva que oprime la uretra sin causar daño en el pene. Fabricado con materiales de grado médico.

### Ajuste de precisión sobre el pene

Cinta dentada que permite colocar y ajustar la correa para el bloqueo de la salida de orina, con la presión más conveniente.



### Regulador de la presión de la uretra

Mediante su activación, ejerce bloqueo de la uretra, evitando fugas involuntarias de orina.


### Palanca de ajuste de la correa

Sistema de seguridad que permite fijar la correa en la posición óptima, controla la salida de orina con un cierre cómodo y firme.

**Fácil de colocar y usar**


# Fácil colocación y uso

1

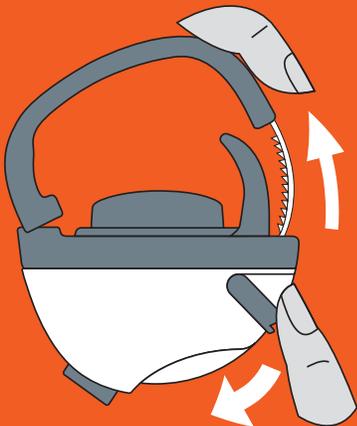


Desplazar la palanca hacia abajo.  
Aflojar la correa.

2

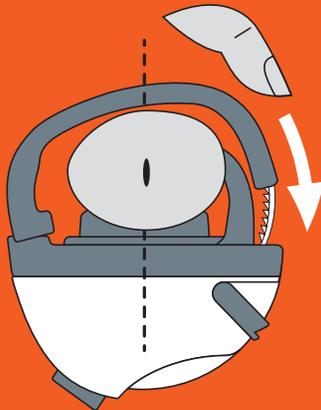

Introducir el pene en el dispositivo  
y ajustar la correa a su contorno.

3

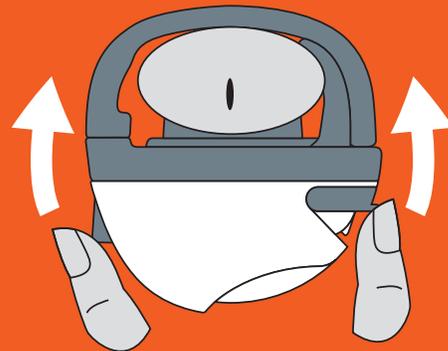

Desplazar la palanca hacia arriba.  
Posteriormente desplazar hacia  
arriba el regulador de presión.

- Solución real al problema mundial de hombres que sufren incontinencia urinaria.
- Genera confianza, **HAREX** se puede utilizar en cualquier actividad deportiva, laboral, social y de descanso, a las que ya habías renunciado, te sentirás seguro, disfrutando con total normalidad ante familiares, pareja y amigos.
- Mejora la calidad de vida, te permite recuperar la libertad en el día a día, mejorando tu bienestar.



*"Con HAREX vuelvo a disfrutar de mi vida diaria"  
"Ahora todo es más fácil y me siento más seguro"  
"Recuperé mi sentido del humor"*

# ¡No te daña, es pequeño, cómodo y totalmente ajustable!

**HAREX** no daña la piel del pene, controla la salida involuntaria de orina con seguridad, comodidad y discreción.



**Permite la circulación de la sangre** ya que solamente bloquea la uretra.



**Otorga independencia** ya que se coloca por el usuario, no requiere que alguien le ayude.



**Es cómodo**, está diseñado para usarse hasta 8 horas al día sin provocar molestias. El dispositivo dura un año.



**Fácil de usar** cuando se requiera, ya que permite la salida voluntaria de orina con solo soltar el regulador de presión. Al terminar se ajusta el regulador nuevamente.



**Durable y confiable**, 100% elaborado con materiales plásticos de alta calidad, certificados para uso humano.



**Limpieza fácil** para una sencilla limpieza, aplicar agua tibia y jabón. No contiene piezas metálicas que puedan oxidarse ni generar problemas dermatológicos.

